

Návod k použití Automatický pažní tlakoměr ABPM-100



Název a popis zobrazovaných symbolů na displeji

Definice symbolu	Identifikace	Poskytnuté informace od výrobce
Podrobnosti o výrobcu		Výrobce
Číslo šarže		Číslo výrobní šarže
Zařízení typu BF		Aplikační součástka (manžeta) typu BF
Návod k použití		Drž se návodu k použití
Notifikovaný subjekt		
Evropský zástupce		Evropský zástupce
Elektrický a elektronický odpad (WEEE)		V EU by zařízení nemělo být likvidováno spolu s ostatním domácím odpadem
Datum výroby		
Sériové číslo		
Udržujte v suchu		



PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM TLAKOMĚRU, ZEJMÉNA TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání tohoto produktu se ujistěte, že dodržíte všechny níže uvedené pokyny. Jakákoli odchylka od těchto pokynů může způsobit zranění nebo poranění nebo ovlivnit přesnost měření.

• Vždy změřte krevní tlak ve stejnou denní dobu, aby byly hodnoty srovnatelné.

- Před měřením buďte alespoň 5 minut v klidu.
- Když musíte provést několik měření individuální, ponechtejte mezi nimi 5 minut pauzu.
- Nejezte, nepijte, nekuřte a neúčastněte se fyzicky činností po dobu nejméně 30 minut před měřením.
- Při samotném měření tlaku nemlujte, aby byla zaručena přesnost.
- Pokud si nejste jisti o výsledku měření a máte pochyby, proveďte další, nové měření.
- Provedená měření slouží pouze k informačním účelům – nejsou náhradou pro řádné lékařské vyšetření.
- Informujte svého lékaře o vašich výsledcích měření, ale nikdy si sami, na základě pouze těchto měření, neměňte medikaci nebo nevysazujte léky bez předchozí domluvy s vaším lékařem.
- Nepoužívejte monitor krevního tlaku u novorozenců, těhotných žen a pacientek s preeklampií.
- Není vhodné, aby lidé s vážnou arytmií používali tento elektronický sfygmomanometr.
- Nepoužívejte jinou, než manžetu dodanou výrobcem, protože hrozí nebezpečí biokompatibilitě, což může vést k chybnému měření.
- Pokud trpíte chronickým nebo těžkým cévním onemocněním (včetně vazokonstrikce), je proces měření na zápěstí omezen. V tomto případě použijte pažní měřič krevního tlaku.
- Kardiovaskulární onemocnění může způsobit nesprávná nebo nepřesná měření. To platí také pro velmi nízký krevní tlak, cukrovku, problémy s oběhem, nepravidelný srdeční rytmus a zimnici, horečku nebo třes.
- Monitor nesmí být používán současně s jakýmkoliv vysokofrekvenčním chirurgickým zařízením.
- Zařízení používejte pouze na osoby, jejichž obvod paže je stejný jako u zařízení.
- Vezměte prosím na vědomí, že během nafukování manžety může být příslušné končetině bráněno v pohybu.
- Při měření krevního tlaku nesmí být oběh blokovan déle, než je nutné. Pokud zařízení nefunguje, odstraňte manžetu z paže.
- Měření neprovádějte příliš často a vyhýbejte se trvalému tlaku v manžetě. To může způsobit snížení krevní cirkulace a může dojít ke zranění.
- Nepoužívejte manžetu na paži, tepny nebo žíly, které jsou léčeny, např. kde je přítomno intravaskulární přístupové zařízení, které je určeno k intravaskulární léčbě nebo pokud je zde arteriovenózní zkrat.
- Nepoužívejte manžetu u osob, které prošly mastektomií.
- Nepoužívejte manžetu na rány, mohlo by dojít k jejich zhoršení.
- Manžetu nasazujte pouze kolem paže. Nedávejte manžetu přes jiné části těla.
- Monitor krevního tlaku je napájen pouze bateriemi.
- Automatické vypnutí znamená, že pokud nebude monitor používán déle než minutu, přejde do úsporného režimu.

- Zařízení je navrženo pro použití tak, jak je popsáno v návodu k použití. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.
- Prosím, nesdílejte manžetu s jinými infekčními osobami, aby se zabránilo křížové infekci.
- Vyvarujte se komprese nebo omezení spojení hadičky během měření, což může způsobit chybu nafouknutí nebo zranění v důsledku trvalého tlaku v manžetě.
- Tento elektronický sfgymomanometr je navržen pro dospělé a nikdy by se neměl používat u kojenců nebo malých dětí. Poradte se se svým lékařem před použitím u starších dětí.

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBU

- Monitor je vyroben z přesných elektronických komponentů. Přesnost naměřených hodnot a životnost zařízení závisí na opatrném zacházení:
 - Chraňte zařízení před nárazy, vlhkostí, špínou, výrazným kolísání teplot a přímým slunečním světlem.
 - Zabraňte pádu zařízení.
 - Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných elektromagnetických polí a držte je dále od bezdrátových nebo přenosných telefonních zařízení atd.
- Pokud zařízení není používáno delší dobu, doporučuje se vyjmout baterie.



POZNÁMKY K BATERIÍM

Pokud dojde ke kontaktu kapaliny z bateriového článku s kůží nebo očima opláchněte postiženou oblast vodou a vyhledejte lékaře.



Nebezpečí požítí! Malé děti by mohly spolknout baterie a udusit se. Mějte baterie mimo dosah dětí!

- Zkontrolujte polaritu - symboly plus (+) a mínus (-).
- Pokud došlo k úniku tekutiny z baterie, nasadte si ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie pomocí suchého hadříku.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.



Neházejte baterie do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!!!

- Nepokoušejte se dobíjet baterie.
- Vyjměte baterie z přihrádky na baterie, pokud zařízení nebudete používat po delší časové období.
- Používejte pouze identické nebo ekvivalentní baterie.
- Vždy vyměňujte všechny baterie současně.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie nerozebírejte, neotevírejte ani nerozsbíjejte.

INSTRUKCE K OPRAVĚ A K ODSTRANĚNÍ

- Baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem.
- Vezměte prosím vybité baterie na sběrná místa určeným k těmto účelům.
- Neotevírejte zařízení. Nedodržení těchto pokynů můžete zrušit záruku.
- Zařízení sami neopravujte ani neupravujte.

Pokud jste tak učinili, bezpečný provoz zařízení již nelze zaručit.


- Pouze oddělení služeb zákazníkům nebo oprávněný provozovatel může provádět jakékoli opravy.
- Před uplatněním jakéhokoli nároku však zkontrolujte stav baterií předem a vyměňte je, pokud je to potřeba.
- V zájmu ochrany životního prostředí by nemělo být zařízení likvidováno s ostatním domácím odpadem na konci své použitelnosti. Mělo by být zlikvidováno na autorizovaných sběrných místech ve vaší zemi. Zařízení musí být zlikvidováno v souladu s evropskými WEEE (Odpadní elektrická a elektronická zařízení). Máte-li k tomu nějaké dotazy, prosím kontaktujte místní orgány odpovědné za likvidaci a recyklaci těchto produktů.

POPIS PŘÍSTROJE



1. Displej
2. Tlačítko Start / Stop
3. Tlačítko Paměť
4. Připojení manžety k tlakoměru
5. Přihrádka pro baterie
6. Stupnice pro vyhodnocení výsledků měření
7. Manžeta
8. Hadička manžety
9. Připojení k manžetě

ZOBRAZENÍ DISPLEJE

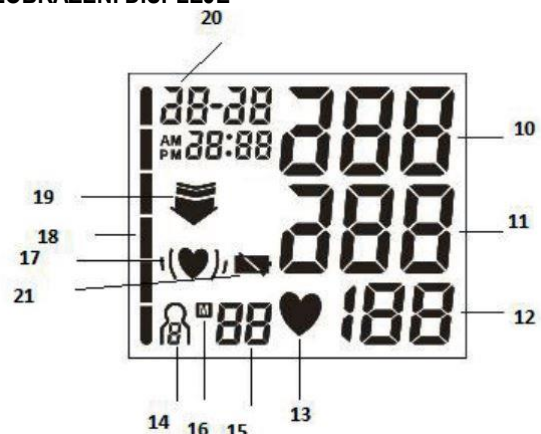

10. Systolický tlak
11. Diastolický tlak
12. Tepová frekvence
13. Symbol pulsu
14. Uživatelská paměť

15. Číslo umístění zálohy / průměrná paměťová hodnota (AL), ráno (A), večer (P)
16. Symbol funkce paměti
17. Symbol nepravidelného srdečního rytmu
18. Pořadí výsledků měření
19. Deflace
20. Datum a čas
21. Symbol výměny baterie

VLOŽENÍ BATERIÍ

- Sejměte kryt prostoru pro baterie (5) na levé straně zařízení.
- Vložte čtyři 1,5 V mikro baterie (alkalické LR03 - nejsou součástí balení).
- Musíte vložit baterie podle ilustrované polarity. Nepoužívejte dobíjecí zařízení na baterie.
- Opatrně zavřete kryt prostoru pro baterie.
- Pokud se objeví symbol výměny baterie (21), je třeba vyměnit všechny baterie.

VYJMUTÍ BATERIÍ

- Vybité baterie musí být zlikvidovány ve speciálních kontejnerech, sběrných místech, nebo vráceny prodejci elektrických spotřebičů. Máte zákonnou povinnost řádně zlikvidovat vybité baterie.

NASTAVENÍ DATA A ČASU

Tato nabídka umožňuje nastavit následující položky jednu po druhé: Čas → Datum → Formát hodin. Datum a čas musíte nastavit. Bez těchto úprav není možná registrace a čtení vašich měření s přesným datem a časem.

FORMÁT ČASU

- Stiskněte a podržte tlačítko STOP / START (2) a Tlačítko Paměť (3) současně na 3 sekund nebo vložte baterie.
- Pomocí tlačítka paměti (3) vyberte požadovaný formát času a potvrďte stiskem Tlačítko STOP / START (2).

DATUM

- Na obrazovce bliká rok. Použitím tlačítko paměti (3), vyberte rok, který požadujete a potvrďte stisknutím tlačítka STOP / START (2).
- Na obrazovce bliká měsíc. Za použití tlačítko paměti (3), vyberte požadovaný měsíc a potvrďte stiskem STOP / START tlačítko (2).
- Na obrazovce bliká Den. Za použití tlačítka paměti (3), vyberte požadovaný den a potvrďte stisknutím tlačítka STOP / START (2).



Pokud byl upraven formát času do 12 hodin, pořadí dne a zobrazený měsíc je obráceně.

ČAS




- Na obrazovce bliká čas. Použitím tlačítka paměť (3) vyberte požadovaný čas a potvrďte stisknutím tlačítka STOP / START (2).
- Na obrazovce blikají minuty. Za použití tlačítka paměť (3) vyberte minuty, které požadujete a potvrďte stisknutím STOP / START (2).

- Jakmile jsou všechna data upravena, zařízení se automaticky vypne.

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

UMÍSTĚNÍ MANŽETY

- Upevni manžetu na holou levou paži. Oběh vaší paže nesmí být omezen příliš těsným oblečením nebo čímkoliv jiným.
- Umístěte manžetu na svou paži tak, aby byl spodní okraj 1 - 2 cm nad ohybem lokte a nad tepnou. Hadička je směřována doprostřed dlaně.
- Nyní upevněte volnou část manžety kolem paže pomocí suchého zipu a ponechtejte prostor na dva prsty.
- Nyní připojte hadičku manžety k tlakoměru.

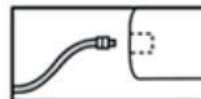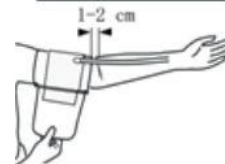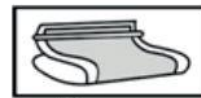

Zařízení se smí používat pouze s originální manžetou. Manžeta je určena pro obvod paže 22 až 30 cm.

NASTAVENÍ DO SPRÁVNÉ POZICE



- Před prováděním jakéhokoliv měření si odpočítejte po dobu alespoň 5 minut. Jinak by mohlo dojít k nepřesnému měření.
- Měření lze provádět pouze v sedě. V každém případě se ujistěte, že je manžeta na úrovni srdce.
- Před samotným měřením si udělejte pohodlí. Ujistěte se, že vaše záda a vaše ruce jsou dobře opřeny o opěradlo a područky. Nemějte nohy přes sebe.
- Aby nedošlo ke zkreslení výsledku, je důležité při měření zůstat klidný a nemluvit.

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

- Umístěte manžetu, jak je popsáno výše, a usadte se do správné pozice pro měření.
- Chcete-li spustit monitor, stiskněte tlačítko STOP / START (2). Celý displej se krátce rozsvítí.
- Chcete-li vybrat požadované místo v paměti, stiskněte tlačítko paměti (3) a vyberte jednoho ze čtyř uživatelů.
- Výsledky měření 4 různých lidí nebo Ranní a večerní průměry se zaznamenávají samostatně do čtyř uživatelských skupin. Každá skupina má paměť na 30 posledních měření.
- Monitor automaticky zahájí proces měření.
- Proces měření můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka STOP / START (2). Jakmile bude rozpoznán puls, zobrazí se na displeji symbol pulsu.
- Výsledky měření systolického tlaku (10), diastolického tlaku (11) a pulsu (12) jsou zobrazeny. Symbol nepravidelného srdečního tepu (pokud existuje) (17) a symbol pro hodnocení výsledků měření (18) blikají.
- Er_ se zobrazí, pokud proces měření nebyl proveden správně. Přečtete si kapitolu Chybové hlášení / Oprava chyb dle těchto pokynů k použití a změřte tlak znovu.
- Vypněte monitor stisknutím tlačítka STOP / Tlačítko START (2). Výsledek měření je pak zaznamenán v uživatelské paměti, kterou jste vybrali.

- Pokud zapomenete zařízení vypnout, vypne se automaticky přibližně po 1 minutě.
- Před dalším použitím vyčkejte alespoň 5 minut po měření.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

NEPRAVIDELNÝ SRDEČNÍ TEP

Toto zařízení dokáže identifikovat jakýkoliv nepravidelný srdeční rytmus během procesu měření. Pokud k nepravidelnému srdečnímu rytmu dojde, zobrazí se po měření symbolem (17) na displeji.

- Nepravidelný srdeční rytmus může znamenat arytmií. Arytmie je nemoc charakterizovaná anomálií srdeční frekvence, která je způsobená poruchami v bioelektrickém systému. Příznaky (srdce bije pozdě nebo brzy, rychlejší nebo pomalejší puls) způsobené zejména srdečními chorobami, věkem, přirozenou predispozicí, příliš bohatou dietou, stresem nebo dokonce nedostatkem spánku. Arytmii může určit pouze lékař po konzultaci. Pokud se po měření zobrazí symbol nepravidelného srdečního tepu, zkuste nové měření. Ujistěte se, že jste před samotným měřením odpočívali po dobu 5 minut a během měření nemluvíte ani se nehýbejte. Pokud se symbol zobrazuje často, obraťte se na vašeho lékaře. Autodiagnostika a samol léčba založená na výsledcích procesu měření může být nebezpečná. Musíte postupovat dle pokynů svého lékaře.

ŘAZENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ

- Výsledky procesu měření jsou seřazeny a vyhodnoceno podle níže uvedené tabulky. Tyto hodnoty lze použít pouze pro informační účely, protože krevní tlak se liší člověk od člověka, podle věku atd.

Je důležité výsledky pravidelně konzultovat s lékařem. Lékař vám poskytne vaše vlastní hodnoty normálního krevního tlaku a hladinu krevního tlaku, která je považována za nebezpečnou. Pořadí se zobrazuje stejně jako měřítko zařízení pro stanovení rozsahu, v němž byl krevní tlak změřen. Pokud jsou systolické a diastolické hodnoty uvnitř dvou různých rozsahů (např. systolický v „normálním vysokém“ rozsahu a diastolický v „normálním“ rozmezí), značky stupnice v grafu budou vždy uvedeny nejvyšší rozsah na zařízení, tj. „normální“ vysoký “v tomto příkladu.

Rozsah hodnot krevního tlaku	Systolický (mmHg)	Diastolický (mmHg)	Zobrazená barva
Level 3: Akutní hypertenze	≥ 180	≥ 110	Červená
Level 2: Středně pokročilá hypertenze	160 – 179	100 - 109	Oranžová
Level 1: Mírná hypertenze	140-159	90 - 99	Žlutá
Normální -	130 - 139	85 - 89	Zelená

zvýšený			
Normální	120 - 129	80 - 84	Zelená
Optimální	<120	<80	Zelená

Zdroj: WHO, 1999 (Světová zdravotnická organizace)

OBNOVENÍ A ODSTRANĚNÍ MĚŘENÉ HODNOTY

- Výsledky každého úspěšného měření jsou zaznamenány s datem a časem. Když se shromáždí více než 30 naměřených dat u jednoho uživatele, nejstarší měření se automaticky smaže.
- Stisknutím tlačítka paměti (3) zobrazíte výsledky měření. Vyberte uživatele a zobrazí se počet zaznamenaných výsledků.
- Stisknutím tlačítka STOP / START (2) vyberte jiného uživatele a potvrďte stisknutím paměti tlačítko (3).
- Poté se zobrazí průměrná hodnota (AL) (15) všech hodnot naměřených a zaznamenaných pro tohoto uživatele.
- Pokud v paměti vybraného uživatele nebude žádný výsledek na LCD displeji se zobrazí „0“ pro krevní tlak a pro měření pulsu.
- Stiskněte tlačítko paměti (3). Na displeji se rozbliká symbol A7. Zobrazuje se průměrná hodnota ranních měření za posledních 7 dní (ráno: 5:00 - 9:00).
- Stiskněte tlačítko paměti (3). Na displeji se rozbliká symbol P7. Zobrazuje se průměrná hodnota večerních měření za posledních 7 dní (večer: 18:00 20:00).
- Pokud znovu stisknete tlačítko paměti (3) znovu se na displeji zobrazí poslední měření. Symbol nepravidelného srdečního tepu (pokud existuje) (17) a symbol pro hodnocení výsledků měření (18) blikají.
- Pokud znovu stisknete tlačítko paměti (3), můžete se podívat na vaše individuální měření.
- Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte tlačítko STOP / START (2).
- Nabídku můžete kdykoli opustit stisknutím tlačítka STOP / START (2)

SMAZÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT

- Chcete-li vymazat záznamy konkrétní uživatelské paměti, nejprve vyberte uživatele.
- Pro smazání výsledků podržte tlačítko paměti (3) po dobu 3 sekund.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ / OPRAVY CHYBY

Problém	Důvod	Řešení
Na displeji se zobrazí abnormální výsledek	Manžeta je ve špatné pozici nebo není dost utažená	Nasadte si správně manžetu a opakujte měření
	Během měření nemáte správné držení těla	Znovu si přečtěte, jaká má být poloha těla během měření a zkuste to znovu.
	Pohyb paže nebo těla,	Zkuste se změřit znovu a

	nervozita nebo rozrušení nebo mluvení během procesu měření	dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
	Srdeční tep je nepravidelný (arytmie)	Tlakoměr není určen lidem, kteří trpí vážnou arytmií

- V případě chyby se zobrazí chybová zpráva na obrazovce Er_.
- Chybová hlášení se mohou zobrazit, když:
 - Systolický nebo diastolický tlak nebyl změřen (na obrazovce se zobrazuje ER1 nebo ER2)
 - Systolický nebo diastolický tlak je mimo měřicí rozsah (na displeji se zobrazí „Hi“ nebo „Lo“)
 - Manžeta je příliš těsná nebo příliš volná (na obrazovce se zobrazí ER3 nebo ER4)
 - Krevní tlak je vyšší než 300 mmHg (na displeji se zobrazí ER)
 - Nafukování trvá déle než 180 sekund (na displeji se zobrazí ER6)
 - V systému nebo zařízení došlo k chybě (Na obrazovce se zobrazí ER7, ER8 nebo ERA)
 - Baterie jsou téměř vybité (18).

POPIS TECHNICKÉHO ALARMU

Pokud je naměřen krevní tlak (systolický nebo diastolický) mimo rozsah uvedený v odstavci „Technické funkce“ zobrazí se na obrazovce ikona „Hi“ nebo „Lo“. V tomto případě se poraďte s lékařem nebo zkontrolujte, zda zařízení používáte správně. Limitní hodnoty technického alarmu jsou hodnoty nastavené výrobcem a nelze je změnit ani deaktivovat. Podle IEC 60601-1-8 tyto hodnoty alarmu nemají vysokou prioritu. Technický poplach není uzamčeným poplachem a není třeba jej resetovat. Signál zobrazený na obrazovce se automaticky vypne přibližně po 8 sekundách.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Zařízení a manžetu pečlivě čistěte pouze pomocí lehce navlhčeného hadříku.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Nikdy nedávejte zařízení ani manžetu do vody. Voda by mohla proniknout do zařízení nebo manžety a poškodit je.
- Na zařízení ani manžetu nepokládejte těžké předměty. Pokud nebudete tlakoměr delší čas používat, odstraňte baterie.
- Doporučuje se kontrolovat přístroj každé 2 roky nebo po opravě. Prosím, kontaktujte servisní středisko.
- Monitor může udržovat bezpečnostní a výkonné charakteristiky minimálně 10 000 měření nebo tři roky.
- Integrita manžety je přibližně 1000 cyklů připnutí a odepnutí.
- Doporučujeme manžetu dezinfikovat 2krát týdně, pokud je to třeba (např. v nemocnici nebo na klinice).
- Vnitřní stranu manžety otřete měkkou tkaninou navlhčenou v ethylalkoholu (75-90%), poté manžetu usušte.

- Je doporučeno vyčistit manžetu po každém dvoustém použití.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRODUKTU

Číslo produktu	LA090206
Metoda měření	Měření krevního tlaku na paži, oscilometrická a neinvazivní metoda měření
Rozsah měření	Tlak v manžetě 0 – 300 mmHg; Systolický tlak 60 – 260 mmHg; Diastolický tlak 40 – 199 mmHg; Puls 40 – 180 tepů / minutu
Paměť	4 x 30 záznamů
Rozměry	+/- 107 x 80 x 52 mm
Hmotnost	+ / - 287 g (bez baterií)
Manžeta na paži	22 – 30 cm
Provozní podmínky	+ 10°C a + 40°C, ≤85% relativní vlhkosti (nekondenzované)
Skladovací podmínky	-20°C a +50°C, ≤85% relativní vlhkosti, 800 – 1 050 hPa okolního tlaku
Napájení	4 x baterie 1.5 V AAA
Životnost baterie	Přibližně 200 měření
Příslušenství	Návod k použití, pouzdro se zipem
Pořadí	Interní napájení, IP20, bez AP nebo APG, nepřetržité používání, BF zařízení
Komponenty pro měření tlaku	Pumpa, ventil, LCD, manžeta, senzor

Může dojít k technickým změnám bez předchozího upozornění za účelem vývoje produktu.

- Toto zařízení odpovídá evropské normě EN60601-1-2 a splňuje speciální bezpečnostní požadavky týkající se elektromagnetické kompatibility. Vezměte prosím na vědomí, že HF přenosná a mobilní komunikační zařízení pravděpodobně mohou ovlivnit přístroj. Pro více informací nebo případnou konzultaci, prosím, kontaktujte poprodejní servis na uvedené adrese na konci návodu k použití.
- Toto zařízení vyhovuje evropské směrnici 93/42 / EHS pro lékařské výrobky, Zákonům o lékařských výrobcích a evropské normě EN1060-1 (týkající se neinvazivních zařízení pro monitorování tlaku, část 1: Obecné požadavky), EN 1060-3 (vztahující se k neinvazivním zařízením pro sledování krevního tlaku, část 3: Doplnkové požadavky na Elektromechanické zařízení monitorování krevního tlaku) a EC80601-2-30 (Elektrické lékařské vybavení, části 2-30: Zvláštní požadavky pro bezpečnost, včetně základního výkonu, automatického neinvazivního monitorovacího zařízení krevního tlaku).
- Přesnost tohoto monitoru krevního tlaku byla správně testována a jeho trvanlivost byla navržena pro dlouhodobé použití. Pokud je zařízení využíváno pro lékařské účely, musí být prováděny technické kontroly. Pro přesné informace jak zkontrolovat

přesnost zařízení, zašlete požadavek na poprodejní servis.



DOPORUČENÁ LIKVIDACE ODPADŮ

Veškeré obaly jsou složeny z materiálů, které nepředstavují žádné riziko pro životní prostředí, a které mohou být zlikvidovány v místním sběrném dvoře. Karton zlikvidujte v místním třídícím centru, používá se jako druhotná surovina. Karton může být také zlikvidován v recyklačním zásobníku na papír. Obalová fólie musí být odvezena do místního recyklačního střediska. Až nebudete zařízení používat, prosím zlikvidujte jej způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu se zákonem. Před likvidací, prosím vyjměte baterie a zlikvidujte je ve sběrném místě pro jejich další recyklaci.



Za žádných okolností nelikvidujte baterie s domácím odpadem.

EC0197 Potvrzení o shodě

Lékařský přístroj kategorie IIa

Lanaform potvrzuje, že zdravotnický prostředek „ABPM-100“ Lot001 LA090206 vyhovuje evropským předpisům Směrnice 93/42/ES o zdravotnických prostředcích a přípravcích a jeho poslední změně 2007/47/ES.

Distributor:

BONECO CR, s.r.o., Na Podhoře 185, 588 13 Polná
Tel.: +420 774 162 396

e-mail: info@boneco-cr.cz, www.boneco-cr.cz



Andon Health CO, LTD, No. 3 Jinping Street,
YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China

Verze: 2020/04

ZÁRUKA

• Boneco CR, s.r.o. (dále jen ručitel) se sídlem v Polně poskytuje záruku na kvalitu zařízení, které distribuuje (dále jen zařízení), ke kterému jsou připojeny provozní pokyny k těmto záručním podmínkám.

• Výrobce ručí v rámci záruky, že je zařízení bez fyzických a právních vad.

• Záruční doba je 24 měsíců pro konečného spotřebitele, 6 měsíců pro komerční použití.

• Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady způsobené příčinami, které jsou vlastní tomuto zařízení.

• Záruka se nevztahuje na:

a) části vystavené přirozenému opotřebení

b) mechanické, tepelné a chemické poškození zařízení způsobené uživatelem

c) poškození a závady způsobené:

- nesprávným nebo neslučitelným s pokyny k použití, údržbě nebo skladování

- nesprávným nebo neslučitelným s instalačními pokyny

- používáním spotřebního materiálu a příslušenství, které nejsou doporučeny Ručitelem

- svévolné opravy, změny a konstrukční změny provedené uživatelem nebo jinými osobami – vyšší moc (povodeň, oheň nebo blesky atd.)

d) závady způsobené nevhodným čištěním Zařízení nebo jeho neprovedením

• Záruka poskytnutá na Zařízení zaniká, pokud jakékoliv neoprávněné osoby (zejména neoprávněným servisním střediskem nebo Kupujícím zařízením) provedou opravy, úpravy nebo změny ve struktuře Zařízení. Identifikace poškození pečeti, štítků nebo jiných bezpečnostních prvků nebo jejich rozmazání, které znemožňuje čtení informací, které jsou na nich obsaženy, lze považovat za pokus o neoprávněné zásahy do zařízení neoprávněné osoby a jako výsledek vyprší platnost záruky.

• Osoba oprávněná v rámci záruky (dále jen „Oprávněná osoba“) je povinna bez zbytečného odkladu nahlásit odhalení vady Zařízením.

• Reklamace na Zařízení v rámci záruky lze podat prostřednictvím obchodu, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele (kontaktní údaje jsou níže).

• Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele (kontaktní údaje jsou níže).

• Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele. Zařízení by mělo být v obalu, který jej chrání před mechanickým poškozením během přepravy.

• Ručitel poskytuje bezplatné odstranění vady do 30 pracovních dnů ode dne doručení vadného Zařízení do servisu Ručitele.

• O tom, jak bude stížnost posuzována, rozhoduje pouze Ručitel.

• V případě výměny vybavení nebo částí za nové se stávají majetkem oprávněné osoby, zatímco vadné vybavení nebo části vyměněné během opravy jsou ve vlastnictví Ručitele.

• Záruční oprava se nevztahuje na činnosti uvedené v provozní příručce, které je uživatel povinen provádět na vlastní náklady (např. výměna spotřebního materiálu, čištění, odstranění vodního kamene, praní, kalibrace atd.)

• V případě neoprávněné stížnosti budou odpovědné osobě účtovány náklady spojené s její přepravou a kontrolou.

• Zařízení předložené k opravě musí být úplně (tj. musí obsahovat všechny prvky původně obsažené v soupravě). K opravě se smí přijímat pouze čistá a suchá zařízení zbavená tekutin. Servis si vyhrazuje právo účtovat příjemci náklady na uvedení zařízení do stavu, který splňuje požadavky na přijetí na servis. Cena je ekvivalentní jedné pracovní hodině servisního zaměstnance.

• Se Zařízením je třeba podat následující náležitosti: doklad o nákupu formou účtenky nebo faktury (včetně razítka obchodu a data nákupu); jasný a přesný popis závady včetně jejího původu a pozorování; Autorizované údaje; jméno a příjemní adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Stížnosti, které neobsahují žádný z prvků uvedených v této části, se považují za nepodané, dokud nebudou odstraněny nedostatky.

• Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se použijí ustanovení občanského zákoníku.

• Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodaného zboží.

Prohlašuji, že jsem si přečetl a přijímám záruční podmínky

.....
Podpis kupujícího

Adresa centrálního servisu:

Boneco CR, s.r.o., Na Podhoře 185, 58813 Polná

Tel: +420 777 162 396, E-mail: info@boneco-cr.cz

www.boneco-cr.cz