

Stažení naměřených dat z tlakoměru Rossmax do PC - návod

Pro stažení dat z tlakoměru Rossmax do PC je třeba stáhnout program ze stránek www.rossmax.com. V pravém horním rohu klikněte na ikonu DOWNLOAD. Nyní se Vám zobrazí různé materiály ke stažení. V levém sloupci vyberte kolonku SOFTWARE AND APPS. Zde si pomocí šipky stáhněte program BP MANAGER 6,2 do PC.

Stažený program je třeba nainstalovat. Klikněte na stažený program a dále klikejte dle následující cesty: BP Manager 6,2 → English (případně jinou jazykovou mutaci) → BP Manager 6,2
Nyní vyskočí tabulka, kterou potvrdíte kliknutím na tlačítko Spustit. Po potvrzení všech vyskakovacích tabulek proběhne instalace programu. Na ploše vašeho PC se nainstaluje červená ikonka s názvem BP Manager 6,2. Program je nyní nainstalovaný.

Pro prohlížení a stahování dat z tlakoměru je třeba rozkliknout nainstalovaný program a připojit tlakoměr k PC. Nejdříve v programu vyplňte údaje o pacientovi. Vlevo dole klikněte na políčko NEW



Vyplňte údaje o pacientovi (jméno, příjmení, adresu apod., je třeba vyplnit také ID pacienta, tzn., že si přidělíte číslo, např. 1, 2). Vyplněné údaje potvrďte ikonou diskety „SAVE“.

Nyní připojte tlakoměr pomocí USB kabelu k PC. Na tlakoměru vyberte zdičku s názvem „DATA“. Tlakoměr zapněte a stiskněte tlačítko „M“. V programu vyberte ikonu Data connect. Po chvíli se načtou data z tlakoměru do programu. Pokud tlakoměr používají 2 lidé, vyberte, která data chcete načíst a potvrďte tlačítkem „SAVE“.

Nyní si můžete vybrat, zda chcete data uspořádat do tabulky stisknutím tlačítka „TABLE“, nebo zda chcete vidět graf, který vyberete stiskem tlačítka „CHART“. Údaje se dají také vytisknout.



Boneco CR, s.r.o., Na Podhoře 185, 58813 Polná, mail: info@boneco-cr.cz

V Polné dne 20. 8. 2019